



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevadores de w.c. económicos

AD509

<http://www.ayudasdinamicas.com/elevadores-de-wc-economicos/>



Descripción

Escoger el asiento adecuado




En la mayoría de casos, las caderas y las rodillas deberían estar a la misma altura. Un asiento demasiado bajo puede estar desaconsejado (post operados de cadera) y resultar incómodo para levantarse.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

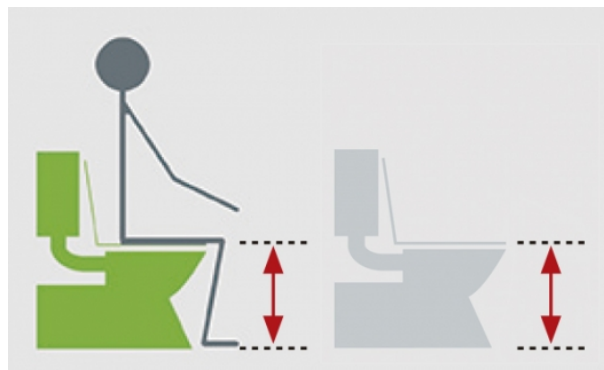

1. Mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Esta es la altura de asiento recomendada.
2. Mida la altura de su asiento actual y réstela de la primera medida.
3. La diferencia entre las dos medidas es la altura del asiento elevador requerida. Adquiera el elevador con la medida más próxima. Las disponibles en el mercado son 5, 10 y 15 cm.

Descripción AD509

Este económico pero seguro y eficaz elevador es de plástico completamente sellado, que resiste los olores y las manchas. El acabado suave facilita las transferencias laterales y su recorte trasero de gran tamaño, para el coxis, proporciona una postura cómoda, y fácil acceso para la higiene personal. Se adapta a la mayoría de retretes sin necesidad de obras o instalaciones y con sólo apretar las dos palomillas laterales el elevador se mantendrá seguro y firme sobre la taza del WC.



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD509C	AD509B	AD509A	AD509B-LUX	AD509A-LUX
ALTO	5 cm	10 cm	15 cm	10 cm	15 cm
TAPA	No	No	No	Si	Si
ANCHO ORIFICIO	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

FONDO ORIFICIO	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm
----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Accesorios



Bidet serie AD509

Bidet de plástico.

Se acopla directamente sobre los elevadores de WC y queda completamente integrado en su interior.
Sólo para elevadores de la serie AD509.

