

SalvacliP® safe / comfort

Petos y cinturones de posicionamiento para pacientes sentados



- Fácil de usar y colocar, ajustable
- Tejido 3D para una mayor comodidad, resistencia y transpirabilidad
- Máximo confort y seguridad
- Nuevo diseño más ergonómico
- Lavable a máquina
- Disponible con 2 opciones de cierre:
 - Clips
 - Cierre de seguridad

Salvaclip® safe / comfort

Petos y cinturones de posicionamiento para pacientes sentados

Equilibrio entre comodidad y seguridad

Salvaclip® es un dispositivo de contención que ofrece seguridad y confort al paciente, siendo de gran ayuda para los cuidadores. **Salvaclip®** ha sido diseñado para proporcionar un soporte postural a pacientes con diversos grados de disminución funcional. Asegura y posiciona al paciente sentado en silla o silla de ruedas, evitando que se incline, ladee, abalance, se deslice en el asiento o adopte posturas que puedan ocasionarle lesiones.

Salvaclip® es también la mejor solución para implementar un programa preventivo de gestión anti-caídas.

Las gamas **Salvaclip® safe** y **comfort** se componen de petos y cinturones. Cada uno de estos modelos está disponible con o sin banda perineal.

Salvaclip® safe

Los sistemas preventivos de seguridad y posicionamiento **Salvaclip® safe** utilizan botón mecánico con apertura por llave magnética como sistema de cierre seguro. Todas las cintas se colocan hacia la parte posterior de la silla, evitando así cualquier manipulación del cierre por parte del paciente. Este sistema permite una regulación según la corpulencia del paciente y el perímetro de la silla. La llave magnética especial permite la apertura del botón de cierre seguro por lo que debe estar siempre bajo el control de los cuidadores para evitar aperturas incontroladas.

Este sistema es apropiado para mantener bajo control a pacientes agitados, agresivos o pacientes que tiendan a liberarse de los sistemas de contención más habituales.

Sistema de cierre seguro, fácil y rápido

El sistema de cierre seguro de **Salvaclip® safe** se compone de:

- Pivote de acero inoxidable
- Botón de cierre seguro
- Llave magnética



Llave con centrador

La nueva llave magnética con centrador es exclusiva de Medi Care System SLU y ofrece una mejor y más rápida apertura de los botones de cierre.



Cuatro diseños disponibles

Salvaclip® safe ofrece cuatro opciones de sujeción:



Peto perineal

Apropiado para pacientes con control mínimo del tronco superior que requieren apoyo alrededor del torso y sobre los hombros para mantenerse en posición vertical. Impide inclinarse hacia adelante, el perineal impide deslizarse.



Peto

Proporciona apoyo en todo el torso y sobre los hombros para mantener a los pacientes en posición vertical. Impide inclinarse hacia adelante y balancearse.



Cinturón perineal

Asegura la sujeción alrededor de la cintura del paciente y evita que se deslice hacia abajo. Apropiado para pacientes con un control estable del tronco superior.



Cinturón

Asegura la sujeción alrededor de la cintura del paciente como soporte de la pelvis. Apropiado para pacientes con un control estable del tronco superior.

Usos

Salvaclip® ha sido diseñado para facilitar la contención y el posicionamiento en pacientes sentados. Los productos **Salvaclip® safe** y **comfort** están diseñados para su uso en silla de ruedas. El cinturón **Salvaclip® safe** y **comfort** con o sin perineal se puede utilizar en sillones o sillas de ruedas.



Cinta de extensión

La cinta de extensión ha sido diseñada para ampliar las posibilidades de adaptación de los cinturones **Salvaclip® safe** en sillas o sillones de mayores dimensiones. También puede ser utilizado para aumentar el contorno del producto y abarcar tallas más grandes.



Aplicación simple y rápida

La aplicación de **Salvaclip® safe** es simple y rápida, se coloca el peto o cinturón sobre el paciente y se pasan las cintas hacia la parte posterior de la silla utilizando los cierres provistos. Una vez cerradas todas las bandas, compruebe que quedan firmes y cómodas sin limitar la respiración del paciente.



Sistemas de cierre

Salvaclip® ofrece 2 sistemas de cierre, cierre por clip y cierre por botón seguro inviolable.



Salvaclip® safe


El sistema de botón mecánico con apertura por llave magnética es seguro e inviolable.



Salvaclip® comfort

El sistema de clip ofrece un cierre y apertura fácil y rápido.

Adaptable, transpirable y cómodo

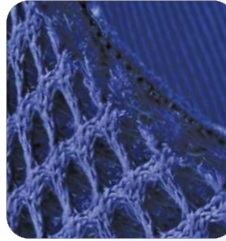

El tejido técnico en 3D utilizado para la confección de **Salvaclip® safe** y **comfort** proporciona una mayor sensación de comodidad. Se adapta y sujeta el cuerpo del paciente de forma ergonómica y confortable. Gracias a su estructura de malla tridimensional ofrece una excelente transpirabilidad y a la vez una muy buena resistencia a la rotura.

Salvaclip® comfort

Los sistemas de posicionamiento **Salvaclip® comfort** utilizan el cierre ajustable clip como sistema de cierre. Todas las cintas se colocan hacia la parte posterior de la silla para evitar cualquier manipulación del cierre por parte del paciente. Este sistema permite una buena regulación según la corpulencia del paciente y el perímetro de la silla.

Este sistema es apropiado para pacientes con riesgo de resbalarse o caerse de la silla, que adopten posiciones incorrectas o que tengan movimientos incontrolados.

Cinta de extensión

La cinta de extensión ha sido diseñada para ampliar las posibilidades de adaptación de los cinturones **Salvaclip® comfort** en sillas o sillones de mayores dimensiones. También puede ser utilizado para aumentar el contorno del producto y abarcar tallas más grandes.



Aplicación simple y rápida

La aplicación de **Salvaclip® comfort** es simple y rápida, se coloca el peto o cinturón sobre el paciente y se pasa las cintas hacia la parte posterior de la silla utilizando los cierres provistos. Una vez cerradas todas las cintas, compruebe que quedan firmes y cómodas sin limitar la respiración del paciente.



Cuatro diseños disponibles

Salvaclip® comfort ofrece cuatro opciones de sujeción:



Peto perineal

Apropiado para pacientes con control mínimo del tronco superior que requieren apoyo alrededor del torso y sobre los hombros para mantenerse en posición vertical. Impide inclinarse hacia adelante, el perineal impide deslizarse.



Peto

Proporciona apoyo en todo el torso y sobre los hombros para mantener a los pacientes en posición vertical. Impide inclinarse hacia adelante y balancearse.



Cinturón perineal

Asegura la sujeción alrededor de la cintura del paciente y evita que se deslice hacia abajo. Apropiado para pacientes con un control estable del tronco superior.



Cinturón

Asegura la sujeción alrededor de la cintura del paciente como soporte de la pelvis. Apropiado para pacientes con un control estable del tronco superior.

Petos y cinturones de posicionamiento para pacientes sentados

Especificaciones e información para pedidos

Seleccione el código y la talla en su pedido.

Salvaclip® Safe

	Medir contorno de cintura + silla en cm		Codigos
	S 90cm - 115cm		SCF 4164
	M 100cm - 135cm		SCF 4165
	L 115cm - 150cm		SCF 4166
	S 90cm - 115cm		SCF 4154
	M 100cm - 135cm		SCF 4155
	L 115cm - 150cm		SCF 4156
	M 90cm - 135cm		SCF 4365
	L 115cm - 165cm		SCF 4366
	M 90cm - 135cm		SCF 4355
	L 115cm - 165cm		SCF 4356
	40cm		SCF 4754
	60cm		SCF 4756

Salvaclip® Comfort

	S 90cm - 115cm		SCC 4114
	M 100cm - 135cm		SCC 4115
	L 115cm - 150cm		SCC 4116
	S 90cm - 115cm		SCC 4104
	M 100cm - 135cm		SCC 4105
	L 115cm - 150cm		SCC 4106
	M 100cm - 135cm		SCC 4315
	L 115cm - 165cm		SCC 4316
	M 100cm - 135cm		SCC 4305
	L 115cm - 165cm		SCC 4306
	40cm		SCC 4704
	60cm		SCC 4706

Nota: Todas las medidas son aproximadas.

Accesorios

Mejore la comodidad y la funcionalidad de **Salvaclip®** con accesorios de Medi Care System SLU.

	Sistemas de cierre seguro
	SVF3500 Caja de 10 botones + pivotes
	SVF3503 Caja de 20 botones
	SVF3504 Caja de 20 pivotes de acero inoxidable
	SVF3551 Caja de 10 llaves magnéticas azules (1 imán)
	SVF3552 Caja de 10 llaves magnéticas naranjas (2 imanes)
	SVF3510 Caja de 10 botones mecánicos de aluminio
	SVF3560 Caja de 10 llaves magnéticas de aluminio
	Caja de emergencia
	SVF3920 Caja de emergencia con cutter incluido
	SVF3900 Cutter
	Clip de cierre
	SCP10HR 40mm (macho/hembra). Bolsa de 10 clips.
	Hebilla corredera
	SCP030R 40mm de hebilla corredera. Bolsa de 10 unidades.
	Presilla elástica color negro
	SCP035R Bolsa de 10 unidades

Productos relacionados

Medi Care System SLU fabrica una amplia gama de productos para el cuidado del paciente.



TUBULAR ANTIDESLIZANTE UNIDIRECCIONAL (TMS-6360)

Un material especial unidireccional antideslizante evita que el paciente se deslice fuera del asiento. Permite un fácil posicionamiento sin esfuerzo para el paciente y el cuidador.




COJÍN PARA SILLA (SVP-2455)

Un cojín de múltiples usos que proporciona una capa adicional de protección contra la presión, y garantiza un máximo apoyo y comodidad al paciente especialmente cuando se sientan por períodos largos. El material lavable y suave ayuda a prevenir las úlceras por presión, hematomas y otras lesiones en la piel.



BANDAS Y CINTURONES DE AYUDA (TMT-6505/TMT-6506)

La banda es útil para repositionar y transferir a los pacientes en la cama o la silla sin presionar sus brazos o sus articulaciones, evitando lesiones a pacientes y a cuidadores. Los dos asas de diferentes longitudes en ambos lados permiten una mejor adaptación a cualquier morfología.

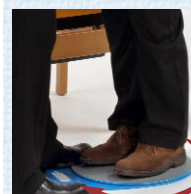

DISCO GIRATORIO (TMT-6550)

Permite al cuidador girar fácilmente a un paciente de pie durante una transferencia (p.e. cama a silla) y reduce el riesgo de tensión o lesión de espalda en el cuidador. Ambos lados están recubiertos con material antideslizante.

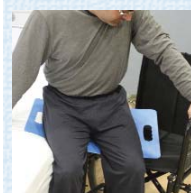


TABLA DE DESLIZAMIENTO (TMG-6400)

Tabla de transferencia diseñada para facilitar las transferencias de pacientes sentadas. La tabla sólida deslizante también es flexible para que pueda ser doblada sobre una silla de ruedas. Incorpora una asa para las manos en cada extremos.

Contacte con Medi Care System SLU para más información sobre los productos relacionados.